

Excel V™

Een nieuwe methode om vaat- en goedaardige pigmentaandoeningen te behandelen

Ontsierende adertjes op gezicht en benen zijn nu verleden tijd voor zowel mannen als vrouwen. Met de meest geavanceerde technologie kan de Excel V laser een grote verscheidenheid aan vaat- en goedaardige pigmentaandoeningen¹ bij mannen en vrouwen met iedere huidtint veilig en effectief behandelen.

Hoe werkt Excel V?

Excel V is een nieuw lasersysteem voor de behandeling van een verscheidenheid aan vaat- en goedaardige pigmentaandoeningen. Veel huidaandoeningen worden gekenmerkt door gesprongen of abnormale bloedvaten in de huid, zoals rosacea, waarbij sterk verwijde bloedvaten in het gezicht roodheid en blozen veroorzaken. Excel V behandelt vaataandoeningen met een unieke, krachtige, groene laser die door de abnormale bloedvaten in de huid wordt geabsorbeerd. De laser verwarmt de abnormale vaten zodat de vaatwanden samentrekken en verkleven. Na enige tijd zijn de vaten niet langer zichtbaar. Er kunnen meerdere behandelingen nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

¹ Na de behandeling zijn de bestaande aders grotendeels of geheel verdwenen. Het ontstaan van nieuwe aders kan echter niet worden voorkomen. Als uw lichaam een onderliggend vaatprobleem heeft, zult u mogelijk verdere behandelingen nodig hebben. Raadpleeg uw arts voor verdere informatie.

excelV™

Testimonial van een patiënt

Christina heeft de diffuse roodheid en gesprongen haarvaatjes op haar gezicht laten behandelen met de Excel V. Deze tekenen van zonschade verschenen tegen de tijd dat ze 50 werd, en hoewel ze eenvoudig te verbergen waren onder make-up, wilde Christina niet vanaf het moment dat ze opstond tot het einde van de dag foundation dragen.

Dit was de eerste laserbehandeling voor Christina, dus ze zag er wel wat tegenop. Ze was aangenaam verrast door de ervaring. De laserpulsen van Excel V voelden aan als prikjes en waren goed verdraagbaar. De hele behandeling duurde minder dan 30 minuten. Vlak na de behandeling was haar gezicht een beetje rood, maar de volgende dag waren de gesprongen haarvaatjes en de diffuse roodheid verdwenen.

Ze was verbaasd over de effectiviteit van de behandeling. Van 's morgens tot 's avonds is haar huid nu helder met een egale teint – zelfs na een glas wijn of een gekruide maaltijd. En bovendien heeft ze niet langer foundation of concealer nodig!

CUTERA®

WERELDHOOFDKANTOOR
3240 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005, VS
Telefoon: 1-888-4CUTERA | www.cutera.com

©2013 Cutera, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Cutera is een gedeponeerd handelsmerk van Cutera, Inc.

AP0104D Rev C (01/13)



EXCEL V™

Bloedvaatjes op het gezicht en de benen behoren nu tot het verleden.

Een veilige en effectieve behandeling voor vaat- en goedaardige pigmentlaesies.


CUTERA®

Poikiloderma




Foto's met dank aan Joely Kaufman, MD

Spataders

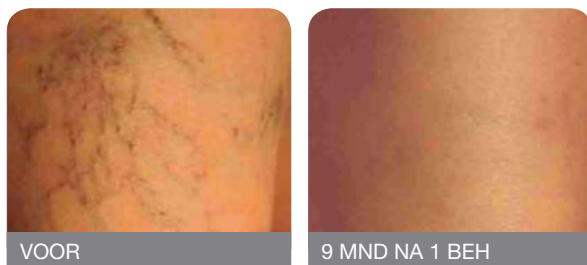

Foto's met dank aan Caddell's Laser Clinic

Periorbitale blauwe aders

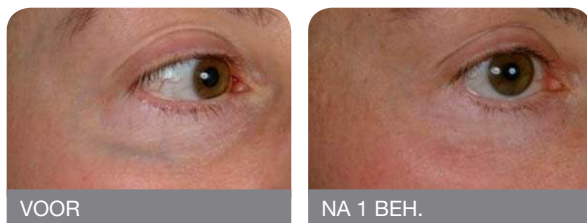

Foto's met dank aan Greg Waslen, MD

Operatielittekens



Foto's met dank aan Cutera, Inc.

Welke specifieke aandoeningen worden met Excel V behandeld?

Het is gebleken dat Excel V effectief is voor de behandeling van een aantal aandoeningen, zoals rosacea, spinaders, spataders, wijnvlekken, cherry angioma's en goedaardige pigmentlaesies zoals leverschimmels. Met Excel V kunnen lichte en ernstige vormen van deze aandoeningen worden behandeld. Het systeem kan ook een cosmetisch voordeel hebben voor patiënten die huidlaesies of littekens hebben van eerdere verwondingen of operaties.

Hoe wordt de procedure uitgevoerd?

Na een intakegesprek bepaalt uw arts of behandeling met Excel V geschikt voor u is. In tegenstelling tot andere procedures, zijn er geen injecties of lokale verdoving vereist tijdens de 15 – 30 minuten durende procedure. Afhankelijk van de aandoening gaat de arts met het Excel V handstuk over de getroffen plaatsen van de huid totdat de abnormale vaten verminderen². Om te zorgen dat de patiënt zo weinig mogelijk ongemak ondervindt en om de huid te beschermen, gebruikt de Excel V een bedrijfseigen koelmechanisme.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen hangt af van diverse parameters, zoals de grootte, dikte en kleur van de vaatlaesie. Oppervlakkige vaatlaesies zijn gewoonlijk het eenvoudigst te behandelen; sommige patiënten zien een aanzienlijke verbetering na slechts één behandeling. Omdat de individuele resultaten variëren, dient u uw arts te raadplegen over uw specifieke aandoening.

² Sommige cliënten zijn tevreden na slechts één behandeling, maar soms zijn twee of meer behandelingen nodig om de gewenste resultaten te bereiken.

Doen de behandelingen pijn?

De meeste patiënten hebben een stekend gevoel wanneer de energiepulsen door het handstuk worden toegediend. Hoewel er gewoonlijk geen lokale verdoving of pijnstillers nodig zijn, verkiezen sommige patiënten om vóór de behandeling een lokale verdoving te gebruiken. Na de behandeling is er minimaal tot geen pijn.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Veel patiënten ervaren weinig of geen bijwerkingen, maar de meest voorkomende bijwerkingen zijn lichte roodheid en zwelling van de huid. Sommige patiënten hebben blauwe plekken en in zeldzame gevallen kunnen blaren voorkomen. Raadpleeg uw arts voor volledige informatie over de voordelen en risico's van de behandeling.

Wanneer zie ik de resultaten?

Bij de meeste patiënten vertoont het merendeel van de behandelde aders aanzienlijke verbetering binnen twee tot zes weken na de behandeling. Het is echter ook mogelijk dat uw eindresultaten pas na enkele maanden zichtbaar zijn.

Wat kost een behandeling met Excel V?

De kosten van Excel V variëren afhankelijk van de grootte van het gebied en de aandoening die wordt behandeld. Raadpleeg uw arts om meer te weten te komen over de behandelkosten.

excelTM✓

Wilt u meer informatie over Excel V, bezoek dan www.ExcelV.com